

体位変換器

自力での動きが困難な方をやさしくサポートします。介護なされる方にとっても、体位変換の介護を軽減することができます。

サービスコード 171006

●原則 要介護 2 以上の方にご利用いただけます。

ラグーナ (体位変換機能付エアマットレス 高機能タイプ)

ラグーナは体位変換器としての貸与マークを取得しています。



素材：カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布
(防水・透湿・制菌・伸縮・防炎)
エアセル/ポリウレタンフィルム (抗菌)
マットレス/プレスエア*

■従来の自動ヘッドアップ対応機能も搭載して、縦・横どちらの動きにも対応する最新の体位変換機能付床ずれ防止マットレスです。
■小さな動きで大きな効果を発揮するスモールチェンジを採用。
■使用される方の身体をズレなく安全にコントロールできるので使用者、介護者の負担軽減に貢献します。

- 84cm幅・レギュラー CR-700
マットサイズ：幅840×長さ1920×厚さ135mm
重量：8.2kg
商品番号 13-0911
TAIS 00206-000102
- 84cm幅・ショート CR-705
マットサイズ：幅840×長さ1800×厚さ135mm
重量：7.8kg
商品番号 13-0912
TAIS 00206-000104
- 90cm幅・レギュラー CR-703
マットサイズ：幅900×長さ1920×厚さ135mm
重量：8.6kg
商品番号 13-0913
TAIS 00206-000103
- 90cm幅・ショート CR-707
マットサイズ：幅900×長さ1800×厚さ135mm
重量：8.2kg
商品番号 13-0914
TAIS 00206-000105

スモールチェンジ機能

自動で小さな体位変換を頻繁に行う



- 体位変換時の動きが小さく安全。
- 小さな体位変換で安眠を妨げない。
- 体力面・精神面など介護者の負担軽減。

自動ヘッドアップ対応機能




| 月額レンタル料金 | |
|----------|--|
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | |
| 2割 | |
| 3割 | |

アスディス



簡単操作のリモコン

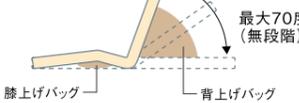

サイズ：本体/幅 930 × 長さ 1480mm
ポンプ/幅 230 × 奥行 185 × 高さ 280mm
重量：本体/12.5kg
ポンプ/5.5kg
電 力：AC100V 50/60Hz 40W

■床(畳)上で生活される利用者の立ち上がりをサポートするエア式起き上がり補助装置です。
■起き上がりが困難な方、ベッドを好まない方、大きなベッドが置けない方などに最適。
■エアによる優しい動きで膝上げと背上げを連動して行い、姿勢の崩れ対策と、楽な姿勢を確保します。
■折りたたむと畳半畳分のコンパクトサイズ。

膝上げ・背上げ連動機能 背は最大70°まで上がります



手すりとの組み合わせによる離床動作



※布団、マットレスは付属していません。


| 商品番号 13-0603 TAIS 00054-000095 | |
|-----------------------------------|--|
| 月額レンタル料金 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | |
| 2割 | |
| 3割 | |

セロリ (体位変換器+高耐久・マルチ・体圧分散式クッション)

■持ち手を引っ張るだけの動作で、簡単に体位変換ができます。 ■体位変換した姿勢をそのまま保持することもできます。
■心地良い触感でムレにくい、特殊なクッションビーズを使用しています。 ■耐久性に優れ、家庭用洗濯機での丸洗いができます。

素材：クッションビーズ/オレフィン系エラストマー
アウターカバー/綿+ポリエステル
インナーカバー/ポリエステル

セロリア MTYA

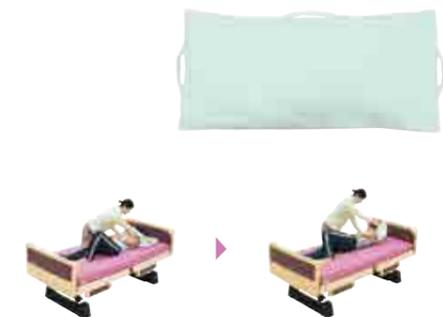


頭~肩の下に入れておき、両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。

片側の持ち手を持ち上げるようにして上半身の向きを変えます。(立てひざにも手を添える)

| 商品番号 13-0604 TAIS 00054-000112 | |
|-----------------------------------|--|
| 月額レンタル料金 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | |
| 2割 | |
| 3割 | |

サイズ：幅 680 × 奥行 320 × 厚さ 100mm
重量：2.4kg

セロリB MTYB

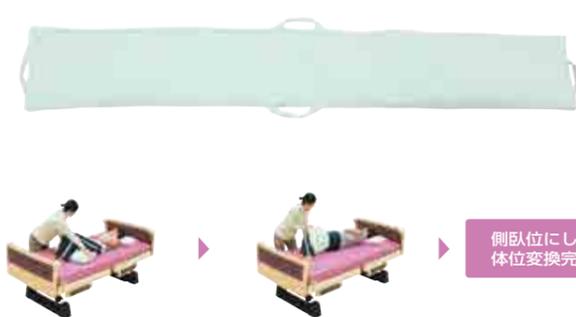

2つ折りにしてひざの下に入れておき、両側にある体位変換用の持ち手をつかみます。

片側の持ち手を持ち上げるようにして下半身の向きを変えます。(肩にも手を添える)

| 商品番号 13-0605 TAIS 00054-000113 | |
|-----------------------------------|--|
| 月額レンタル料金 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | |
| 2割 | |
| 3割 | |

サイズ：幅 1410 × 奥行 230 × 厚さ 80mm
重量：3.1kg

トレイジースライドシート

■シート本体の素材が滑りのよいナイロンで、3層構造の中間層が上下層の動きに干渉されないため、上下左右、回転等の動作がわずかな力で可能になります。

サイズ：幅 750 × 長さ 1200mm
素 材：シート地/ナイロン



上下の体位移動例 (主に2つ折りにして使用)



折り目部分を持ち頭部側から差し込み、おしりの下まで敷きます。右手で足元を軽く押さえ、左手でひざを押すように移動します。

左右の体位移動例 (主にジャバラ折りにして使用)



ジャバラ状に折ったシートを体の下に差し込み、反対側の背部から引き出し、広げます。肩と骨盤に手を当て軽く手前に引き移動します。

| 商品番号 13-4801 TAIS 00947-000001 | |
|-----------------------------------|--|
| 月額レンタル料金 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | |
| 2割 | |
| 3割 | |

ライトターン



使用方法



1 本体の中央隔壁を足先のほうに向けて倒し、凹部に乗せます。

2 本体を回転させて起こし、両膝を両側の凹部に入れます。

3 まず側部のベルトを持って回転させ、肩も少し押しながら寝返りを行います。

4 股間を開いた状態を保持できるので、おむつ交換や排便が容易に行えます。

■介護の方が簡単にベッド上での寝返り介助をおこなえる、新発想の体位変換器です。
■膝や股関節拘縮や床ずれを防止します。
■股関節を軽く開いた状態を保持できるので、おむつの交換がラクにできます。

| 商品番号 13-2102 TAIS 00149-000017 | |
|-----------------------------------|--|
| 月額レンタル料金 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | |
| 2割 | |
| 3割 | |

サイズ：幅 430 × 奥行 130 × 高さ 390mm
重量：950g(カバー含む)
素 材：クッション/高密度高硬度ウレタン
高密度高弾性ウレタン
高密度低弾性ウレタン
芯材/ポリプロピレン樹脂
カバー/ポリウレタンソフトレザー



◆おむつ交換に ◆関節拘縮や床ずれ防止に

アルファラウェルピーHC


■優しく少ない力で体位変換できるポケット付。 ■特殊加工のウレタンチップが滑ってフィット。優しくピタッと支えます。
■新素材で耐久性が大幅にアップ、へたりにくくなりました。 ■丸洗いができるので衛生的で、乾燥機も使用可能です。

素材：生地/ポリエステル 100%
中材/ポリウレタンフォーム、ナイロン

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| <p>●ジャンボ 商品番号 13-3803 TAIS 00563-000073 サイズ：幅 730 × 長さ 730mm 重量：2,400g</p> | <p>●プーラン(大) 商品番号 13-3807 TAIS 00563-000074 サイズ：幅 500 × 長さ 900mm 重量：1,300g</p> | <p>●プーラン(小) 商品番号 13-3808 TAIS 00563-000075 サイズ：幅 440 × 長さ 740mm 重量：800g</p> | <p>●ウェーブ 商品番号 13-3805 TAIS 00563-000076 サイズ：幅 750 × 長さ 650mm 重量：1,200g</p> | <p>●スティック(小) 商品番号 13-3809 TAIS 00563-000078 サイズ：幅 200 × 長さ 400mm 重量：300g</p> | <p>●ミニ 商品番号 13-3810 TAIS 00563-000079 サイズ：幅 300 × 長さ 500mm 重量：400g</p> |
| <p>●スティック(大) 商品番号 13-3806 TAIS 00563-000077 サイズ：幅 200 × 長さ 600mm 重量：450g</p> | <p>●ピロー 商品番号 13-3804 TAIS 00563-000080 サイズ：幅 300 × 長さ 800mm 重量：800g</p> | <p>※地域によっては取扱いのない場合もございます。</p> | | | |

ナーセントパットA

■片手で差し込めるので、一人で体位変換ができます。
■床ずれ防止に。寝返り補助に。
■体圧分散性に優れた高密度特殊ウレタン。
■外カバーは、裏面撥水加工。
サイズ：大ピース/400 × 400 × 100mm
小ピース/200 × 400 × 100mm

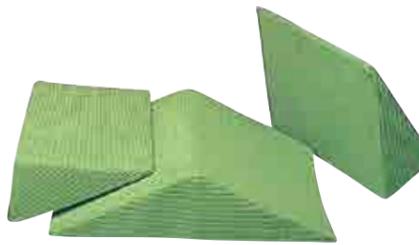

アイ・ソネックス



◆側臥位(横向き)使用例



◆仰臥位(仰向け)使用例



◆車いすでの使用例

| 商品番号 13-2101 TAIS 00149-000012 | |
|-----------------------------------|--|
| 月額レンタル料金 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | |
| 2割 | |
| 3割 | |

※地域によっては取扱いのない場合もございます。

ペンギンサポート



パラマウントベッド



寝位置修正に



オムツ交換に

■側臥位への体位変換や、寝位置修正する為の体位変換器です。ベッド上でサイドレールなどに固定すると、側臥位の一時的な保持ができるので「おむつ交換」などを楽に、より安全に行うことができます。

| 商品番号 13-0101 TAIS 00170-000713 | |
|-----------------------------------|--|
| 月額レンタル料金 | |
| ご利用者様負担額 | |
| 1割 | |
| 2割 | |
| 3割 | |

サイズ：幅 480 × 長さ 1630mm
重量：0.3kg
素 材：本体/ナイロン 100% (撥水加工)
中材/ポリエチレンフォーム
面ファスナー/ポリエステル 100%
ビニールバック/ポリ塩化ビニル
最大使用者体重：138kg